

" A SUA ARTE EM BOAS MÃOS "

TropicalDerm

ESTILO PRO SERIES

PERSONAL PACK FILM FIX PRO ENVELOPE

EXTERNAL 1X

10 X 20CM



PORTUGUÊS

PACOTE PERSONAL CONTÉM 3 FOLHAS DE 10 X 20CM

O novo TropicalDerm® Filme Fix PRO Envelope, vem agora com cantos arredondados para facilitar sua fixação. É um adesivo de poluretano extra-fino hipoalérgênico, transparente, livre de látex, é a solução de tratamento pós-tatuagem, utilizada na fase inicial da cicatrização, funcionando como uma "segunda pele". Esse produto bloqueia os fluidos naturais do corpo e as enzimas, que de outra forma seriam perdidos por evaporação. Os fluidos mantêm as células hidratadas, o que auxilia na cicatrização da pele com um processo natural, de dentro para fora. Atua como uma barreira protetora contra germes e bactérias.

COMO APLICAR TROPICALDERM® FILME FIX PRO

Antes de aplicar o novo TropicalDerm® Filme Fix PRO Envelope, limpe adequadamente a tatuagem como de costume, assegurando que a pele esteja livre de qualquer resíduo. Em seguida, aplique o Spray Tattoo Sealing®, para garantir maior permanência de tinta na pele e redução do inchaço.

- 1) Remova o revestimento indicado com a seta número 1 para expor a superfície adesiva do curativo.
- 2) Aplique a superfície adesiva em uma área sem pelos e remova o restante do revestimento indicado com a seta número 2.
- 3) Após a aplicação total da parte adesiva, reforce sua fixação passando levemente a mão sobre o filme. Retire a folha protetora indicada com a seta número 3. Para tatuagens de grande escala repita este processo por mais de uma vez adicionando outras folhas sobrepondo suas bordas em 2 cm, até cobrir toda a tatuagem.

FASE DE APLICAÇÃO

A primeira aplicação do TropicalDerm® Filme Fix PRO pode ser mantida na pele por até 24 hrs. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Qualquer outra aplicação de TropicalDerm® Filme Fix PRO pode ser mantida por um período de tempo variável, dependendo da necessidade do cliente conforme a recomendação profissional. Elimine a necessidade de loções e pomadas. Garanta que sua tatuagem cicatrize de forma vibrante. Os clientes relatam menos dor, menos coceira e um tempo de cura completa de 4/6 dias.

REMOÇÃO

Levante o curativo de uma das pontas e tracione cuidadosamente, em paralelo a pele. Posicione uma das mãos sobre o mesmo para dar suporte a pele.

PRECAUÇÕES

Use conforme as indicações do produto. Não usar TropicalDerm® Filme Fix PRO sobre feridas infectadas, feridas profundas ou altamente exsudativas. Em caso de reação alérgica ou qualquer irritação, remova o curativo, suspenda o seu uso e procure orientação médica.

ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser conservado a temperatura ambiente, evite calor e umidade excessiva.

N.B.: ENTRE AS TROCAS DO TROPICALDERM® FILME FIX PRO LAVAR COM ÁGUA E SABÃO PH NEUTRO E SECAR DELICADAMENTE A TATUAGEM.

N.B.: Filme Fix PRO em envelope de película TropicalDerm® Filme Fix lavar com água e sabão pH neutro e secar delicadamente a tatuagem.

ESPAÑOL

EL PAQUETE PERSONAL CONTIENE 3 HOJAS DE 10 X 20CM

El nuevo sobre de película TropicalDerm® Filme Fix PRO, ahora viene con esquinas redondeadas para una fácil colocación. Es un adhesivo hipoalérgico extra-fino de poluretano transparente, sin látex, es la solución de tratamiento post-tatuaje, utilizada en la fase inicial de cicatrización, funcionando como una "segunda piel". Este producto bloquea los fluidos y enzimas naturales del cuerpo, que de otro modo se perderían por evaporación. Los fluidos mantienen las células hidratadas, lo que ayuda a que la piel sane con un proceso natural, de adentro hacia afuera. Actúa como barrera protectora contra gérmenes y bacterias.

COMO APLICAR TROPICALDERM® FILME FIX PRO

Antes de aplicar el nuevo TropicalDerm® Filme Fix PRO Envelope, limpie el tatuaje correctamente como de costumbre, asegurándose de que la piel esté libre de cualquier residuo. Luego, aplica el Tattoo Sealing® Spray, para asegurar una mayor permanencia de la tinta en la piel y reducción de la hinchazón.

- 1) Retire el recubrimiento indicado con la flecha número 1 para exponer la superficie adhesiva del apósito.
- 2) Aplicar la superficie adhesiva sobre una zona sin pelo y retirar el resto del recubrimiento indicado con la flecha número 2.
- 3) Una vez que la parte adhesiva se haya aplicado por completo, refuerce su fijación pasando ligeramente la mano sobre la película. Retire la hoja protectora indicada con la flecha número 3. Para tatuajes a gran escala repita este proceso más de una vez agregando otras hojas superponiendo sus bordes 2 cm, hasta cubrir todo el tatuaje.

FASE DE APLICACIÓN

La primera aplicación de TropicalDerm® Filme Fix PRO se puede mantener sobre la piel hasta por 24 horas. Esto variará de una persona a otra. Cualquier otra aplicación de TropicalDerm® Filme Fix PRO se puede mantener durante un período de tiempo variable, dependiendo de la necesidad del cliente según la recomendación profesional. Elimina la necesidad de lociones y ungüentos. Asegúrese de que su tatuaje se cure de una manera vibrante. Los clientes informan menos dolor, menos picazón y un tiempo de curación completo de 4/6 días.

ELIMINACIÓN

Levante el apósito de un extremo y tire con cuidado, paralelo a la piel. Coloque una mano sobre el para apoyar la piel.

PRECAUCIONES

Utilizar como se indica en el producto. No aplicar TropicalDerm® Filme Fix PRO sobre heridas infectadas, heridas profundas o muy exudativas. En caso de reacción alérgica o cualquier irritación, retire el apósito, suspenda su uso y busque atención médica.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad excesiva.



SKU: TDEFFP3

INFO@TROPICALDERM.COM.BR
VENDAS@TROPICALDERM.COM.BR

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
WHATSAPP-55 44 3801-1411

TROPICALDERM.COM.BR



LOTE: TDEP102022

FAB.: 01/11/2022

VAL.: 01/11/2027



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C148849



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: TropicalDerm Ltda, CNPJ: 30.208.748/0001-96, Rua José Pereira da Costa, 133/139, CEP: 87005-220 - Maringá - PR - Brasil Nº AFE ANVISA: 8.23.280-7 - Classe: 1 - R23280/2004

RESP. TÉCNICO: Danilo Felix Silva de Oliveira CRF/PR: 26996

MADE IN CHINA