

"A SUA ARTE EM DUAS MÃOS"

TropicalDerm

ARTIGO PROFISSIONAL

PERSONAL PACK FILM FIX PRO ENVELOPE

ARTIGO Nº 1

10 X 20CM



PORTUGUÊS

PACOTE PESSOAL CONTÉM 3 FOLHAS DE 10 X 20CM

O novo TropicalDerm[®] Filme Fix PRO Envelope, vem agora com cantos arredondados para facilitar sua aplicação. É um adesivo de poluretano extra-fino hipoalérgico, transparente, livre de látex. É a solução de tratamento pós-tatuagem, utilizada na fase inicial da cicatrização, funcionando como uma "segunda pele". Esse produto bloqueia os fluidos naturais do corpo e as enzimas, que de outra forma seriam perdidas por evaporação. Os fluidos mantêm as células hidratadas, o que auxilia na cicatrização da pele com um processo natural, do dentro para fora. Age como uma barreira protetora contra germes e bactérias.

COMO APLICAR TROPICALDERM[®] FILME FIX PRO

Antes de aplicar o novo TropicalDerm[®] Filme Fix PRO Envelope, limpe adequadamente a tatuagem como de costume, assegurando que a pele esteja livre de qualquer resíduo. Em seguida, aplique o Spray Tattoo Sealing[®], para garantir maior permanência de tinta na pele e redução do inchaço.

- 1) Remova o revestimento indicado com a seta número 1 para expor a superfície adesiva do curativo.
- 2) Aplique a superfície adesiva em uma área sem pelos e remova o restante do revestimento indicado com a seta número 2.
- 3) Após a aplicação total da parte adesiva, refixe sua fixação passando levemente a mão sobre a filme. Retire a folha protetora indicada com a seta número 3. Para tatuagens de grande escala repita este processo por mais de uma vez adicionando outras folhas sobrepondo suas bordas em 2 cm, até cobrir toda a tatuagem.

FASE DE APLICAÇÃO

A primeira aplicação de TropicalDerm[®] Filme Fix PRO pode ser mantida na pele por até 24 hrs. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Qualquer outra aplicação de TropicalDerm[®] Filme Fix PRO pode ser mantida por um período de tempo variável, dependendo da necessidade do cliente conforme a recomendação profissional. Elimine a necessidade de loções e pomadas. Garanta que sua tatuagem cicatrize de forma vibrante. Os clientes relatam menos dor, menos coceira e um tempo de cura completa de 4/6 dias.

REMOÇÃO

Lavante o curativo de uma das pontas e fracione cuidadosamente, em paralelo a pele. Posicione uma das mãos sobre o mesmo para dar suporte a pele.

PRECAUÇÕES

Use conforme as indicações do produto. Não usar TropicalDerm[®] Filme Fix PRO sobre feridas infectadas, feridas profundas ou altamente exsudativas. Em caso de reação alérgica ou qualquer irritação, remova o curativo, suspenda o seu uso e procure orientação médica.

ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser conservado a temperatura ambiente, evite calor e umidade excessiva.

N.B.: ENTRE AS FOLHAS DO TROPICALDERM[®] FILME FIX PRO LAVAR COM ÁGUA E SABÃO PH NEUTRO E SECAR DELICADAMENTE A TATUAGEM

N.B.: Entre las hojas del curativo TropicalDerm[®] Filme Fix PRO lavar con agua y jabón pH neutro y secar delicadamente la piel.



ESPAÑOL

EL PRODUCTO PERSONAL CONTIENE 3 HOJAS DE 10 X 20CM

El nuevo sobre de película TropicalDerm[®] Filme Fix PRO, ahora viene con esquinas redondeadas para una fácil colocación. Es un adhesivo hipoalérgico extra-fino de poluretano transparente, sin látex. Es la solución de tratamiento post-tatuaje, utilizada en la fase inicial de cicatrización, funcionando como una "segunda piel". Este producto bloquea los fluidos y enzimas naturales del cuerpo, que de otra modo se perderían por evaporación. Los fluidos mantienen las células hidratadas, lo que ayuda a que la piel sane con un proceso natural, de adentro hacia afuera. Actúa como barrera protectora contra gérmenes y bacterias.

COMO APLICAR TROPICALDERM[®] FILME FIX PRO

Antes de aplicar el nuevo TropicalDerm[®] Filme Fix PRO Envelope, limpie el tatuaje correctamente como de costumbre, asegurándose de que la piel esté libre de cualquier residuo. Luego, aplica el Spray Tattoo Sealing[®] para asegurar una mayor permanencia de la tinta en la piel y reducción de la hinchazón.

- 1) Retire el recubrimiento indicado con la flecha número 1 para exponer la superficie adhesiva del apósito.
- 2) Aplique la superficie adhesiva sobre una zona sin pelo y retire el resto del recubrimiento indicado con la flecha número 2.
- 3) Una vez que la parte adhesiva se haya aplicado por completo, refije su fijación pasando levemente la mano sobre la película. Retire la hoja protectora indicada con la flecha número 3. Para tatuajes a gran escala repita este proceso más de una vez agregando otras hojas superponiendo sus bordes 2 cm, hasta cubrir todo el tatuaje.

FASE DE APLICACIÓN

La primera aplicación de TropicalDerm[®] Filme Fix PRO se puede mantener sobre la piel hasta por 24 horas. Esto varía de una persona a otra. Cualquier otra aplicación de TropicalDerm[®] Filme Fix PRO se puede mantener durante un período de tiempo variable, dependiendo de la necesidad del cliente según la recomendación profesional. Elimine la necesidad de lociones y pomadas. Asegure de que su tatuaje se cure de una manera vibrante. Los clientes informan menos dolor, menos picazón y un tiempo de curación completa de 4/6 días.

ELIMINACIÓN

Lavante el apósito de un extremo y tire con cuidado, paralelo a la piel. Coloque una mano sobre él para apoyar la piel.

PRECAUCIONES

Utilizar como se indica en el producto. No utilizar TropicalDerm[®] Filme Fix PRO sobre heridas infectadas, heridas profundas o muy exudativas. En caso de reacción alérgica o cualquier irritación, retire el apósito, suspenda su uso y busque atención médica.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse a temperatura ambiente, evite el calor y la humedad excesivos.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: TropicalDerm Ltda CNPJ: 38.208.748/0001-96, Rua José Pinheiro da Costa, 133/131 CEP: 81505-230 - Maringá - PR - Brasil N.º AFZ ANVISA: 8.23.286-7 - Classe: 1 - 81328070034
 RESP. TÉCNICO: Danilo Felix Silva de Oliveira CRF-PR: 26966
 MADE IN CHINA